

SCENARIO 患者シナリオデータ移行方法

1. ホームページからダウンロードしたファイルを解凍して、USB直下に以下の状態で保存してください。

- 1.メトトレキサート服用患者へのフィジカ... ファイルフォルダー
- 2.ロキソプロフェン服用患者へのフィジカ... ファイルフォルダー
- 3.クラリスロマイシン服用患者へのフィジ... ファイルフォルダー


2. シナリオ作成モードを選択してください。



3. USBを挿入して、取り込みボタンを押します



4. その他タブを押してコピーされているか確認します

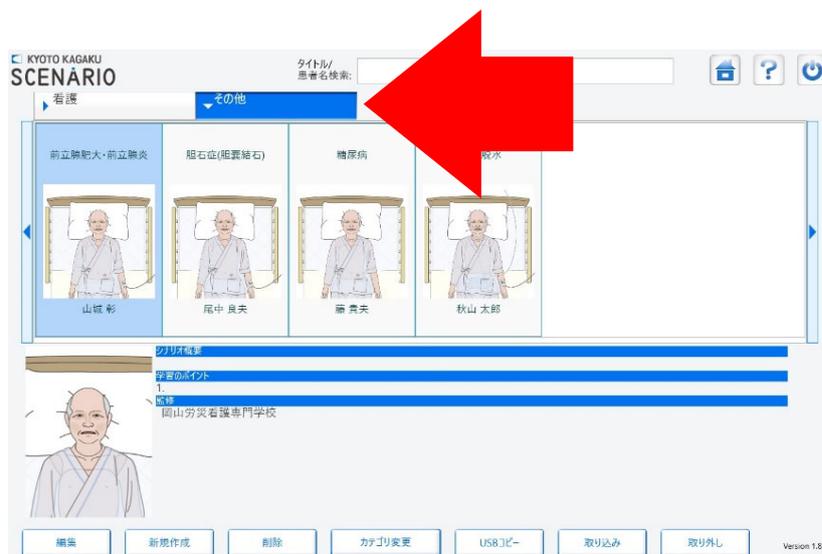

5. シミュレーションモードを選びます



6. その他のタブからシナリオが選べます。

